

이식형의약품주입기

[품목명] 이식형의약품주입기

[형 명] 제품 포장 제조원 라벨에 기재된 “REF : XXXXXXXXX” 참고

[허가(신고)번호] 수허 11-621호

[제품의 사용목적] 본 제품은 혈액제제, 비경구 영양수액의 주입 및 통증제어, 신경자극이나 비만치료를 위한 위 밴드 또는 위내 삽입물을 채우기 위하여 장기적으로 혈관에 접속하는데 사용

[보관 또는 저장방법] 시원하고 건조한곳에 보관한다.

[사용방법]

■ 사용전 준비사항

- (1) 자격이 있는 의사만이 포트를 이식하도록 한다
- (2) 포트를 이식하기 전에 반드시 멀균 이증포장 상태에 이상이 없는지 확인한 후, 포장이 변경, 손상 또는 파손된 경우 제품을 사용 하지 않는다.
- (3) 카테터를 쇄골하정맥에 이식하는 경우, 늑골-쇄골 겸자 바깥쪽의 쇄골하정맥 부위에 천자를 수행할 것을 권장한다.
- (4) 이식에 필요한 모든 장비가 준비되었는지 확인한다.
- (5) 경피적 유도관 (Introducer)을 사용하는 경우, 선택한 카테터와의 호환성을 확인한다. (박스의 ID 스티커 확인)
- (6) 이식을 수행하기 전에 포트와 카테터를 세척한다.
- (7) 카테터를 절단하기 전에 클램프로 고정시킨다. 그다음 정맥으로 카테터를 삽입할 수 있다.

■ 사용방법

●포트 이식부위 (Port Implantation site)

- (1) 포트의 위치는 환자마다 달라질 수 있다. 저항을 견디면서 포트를 부착할수 있는 부위(큰근육부위, 뼈부위)를 선택한다.
- (2) 시술자국과 겹치지 않도록 이식부위는 포트를 수용할 수 있을 정도로 깊은 심부아이야 한다.
- (3) 축진을 통해 손쉽게 위치를 확인할 수 있도록 선택한 부위에 포트를 지나치게 깊이 이식하지 않도록 유의하고, 피부 손상의 방지를 위해 지나치게 피부 표준 부위 (=5mm)에 이식하지 않도록 한다.

●카테터 이식 (Catheter implantation)

- 카테터 이식은 수술 또는 경피적 방법으로 수행이 가능하며, 카테터는 의도된 치료부위에 따라 몇가지 부위에 배치가 가능하다.
- (1) 정맥 내 이식의 경우 카테터 엔드는 우심방구 레벨에서 대정맥 내부에 위치시킨다. 카테터를 혈관 내부에 위치시켰다면, 포트 출구에 연결할 수 있도록 여분의 카테터 길이를 확보해야 한다. 최상의 유속을 얻기 위해서는 카테터 길이는 가능한 짧아야 한다.
 - (2) 동맥 내 이식의 경우 간과 골반 동맥 레벨에서 국소 항임차치료에 사용된다. (3) 복막 내 이식의 경우 복막 암종을 위한 특수한 방법이다.
 - (4) 환자에게 상대정맥 혈전증이 있는 경우, 전상정골극(ante superior iliac spine) 내부에 포트를 이식할 수 있다. 이러한 경우, 카테터는 하대 정맥에 최대한 도달하도록 정골정맥내로 삽입하여야 한다.
 - (5) 통증치료의 경우, 다음과 같은 방법으로 이식을 수행한다.
 - 피하 경로 : 근육과 경로보다는 선호되지만 일일주사에 대해서는 권장되지 않는다.
 - 경막 외 경로 : 정확한 통증 위치에 따라 카테터는 흉부, 경주 또는 요추 경로를 통해 삽입된다.
 - 경막 내 경로 : 두개-척추 (cephalo-rachidian)에 직접 또는 오피오이드 (opioide) 수질 수용체 가까이에 모르핀을 주사할 수 있다.

●카테터 연결 (Catheter connection) / 이식포트 (Implantable port)

연결링을 카테터에 연결한다. 카테터를 포트에 연결한다. 카테터를 포트에 삽입한다. (약 5mm)

세트(연결링과 카테터)를 함께 잡고 연결링을 포트에 도달할 때 까지 밀어넣는다. 연결링과 포트 사이로 카테터가 보이면 연결이 제대로 된 것이다.

●주입 및 샘플 (Injections and Samplings)

(1) 시술부위 멀균 : 시술과정을 수행하기 전에 환자의 피부를 준비하는 것이 필수적이다. 준비과정은 수술실에서 사용되는 것과 동일한 살균비누를 사용하여 수행한다.

(2) 각각의 주입 및 샘플링 과정은 다음의 3단계 과정으로 수행되어야 한다.

1) 포트 위치파악 : 축진을 통해 포트의 Septum을 찾은 후, 오른손잡이일 경우 원손을 사용하여 포트 베이스를 잡는다.

2) 피부에 수직으로 Huber 니들을 삽입한다. 격각을 통과하게 되면 점성물질이 관통되는 느낌을 받는다.

포트의 바닥에 도달할 때 까지 니들을 삽입해야한다. 니들이 제대로 위치되었는지는 혈액의 역류 발생여부로서 확인 가능하다. 역류가 발생되면 즉시 약10ml의 생리적 혈청을 주입해야 한다.

3) 카테터로 혈액이 역류되는 것을 방지하기 위해 니들을 제거하는 경우 피스톤 압력을 유지하도록 한다.

■ 사용 후 관리방법 : 본 제품은 일회용 제품이므로 사용 후 규정에 의거하여 폐기하도록 한다.

【사용시 주의사항】

■ 경고

- (1) 지적 있는 의사만이 본 제품을 이식할 수 있다. 사용 전에 의사는 사용자 매뉴얼을 철저히 숙지하여야 한다. 유자관리는 교육을 받은 자격있는 전문가에 의해서만 수행되어야 한다.
- (2) 카테터를 포트 출구에 설치할 때에는 어떠한 종류의 접개도 사용하지 않는다. (카테터 손상의 위험)
- (3) 포트를 제거하였을 때에는 이식되었던 모든 구성물을 뽑았는지를 확인한다.
- (4) 「이식형의약품주입기」 사용시, 환자의 피하에 이식된 약물주입용 포트(Port)가 아닌 피하조직에 의도하지 않은 약물이 투여되어 중대한 상처 및 약을 과투하 등으로 인한 사망 가능성이 있다.

■ 주의사항

- (1) 카테터와 함께 이식포트를 사용할 때에는 적절한 무균 기구를 사용하여야 한다.
- (2) 일반 니들을 사용할 경우 Septum을 손상시키거나 천공시킬수 있으므로 Straight 또는 Curved 타입의 Huber 니들을 사용할 것을 권장한다.
- (3) 최소 10ml 이상의 주사기를 사용하도록 한다. 적은 용량의 주사기를 사용할 경우 카테터 차단, 파열 및 이동, 포트의 손상을 일으킬 수 있다.
- (4) 주사기 니들을 제거할 때에도 양압을 유지하여 주입을 계속한다.
- (5) Huber 니들의 길이는 사슬 타입에 따라 포트의 이식되는 깊이, 포트의 직경에 잘 맞아야 한다.
- (6) 혈액 채취 시 초기에 채취된 약간의 혈액은 버려야 한다.
- (7) 편류나 주입을 하지 않을 때에는 어떠한 경우에도 니들을 그 자리에 놔두지 않는다.
- (8) 환자는 샤워나 목욕을 할 때 보통 때처럼 행동하여야 한다. 다만, 자동차 안전벨트를 사용할 때에는 불편함이 있을 수 있다.

■ 금기

- (1) 절대적 금기 (Absolute contra-indications)
 - 환자의 반대의사
 - 강염부위
 - 혈액 내 박테리아 존재, 패혈증 및 복막염
 - 포트 및 카테터 원자재에 대한 알레르기
 - 국소 또는 전신마취와 관련된 위험
- (2) 일시적 금기 (Temporary contra-indications)
 - 세균 아래쪽을 통해 정맥 접근장치가 이미 있는 경우, 상대정맥 증후군
- (3) 상대적 금기 (Relative contra-indications)
 - 방사선 치료 부위
 - 피부 전이
 - 증격 종양
 - 혈액 둥고 troubleshooting

【멸균에 관한 정보】 멸균방법-Ethylene Oxide (ETO), 멸균보증수준 - SAL10-6, 멸균유효기간 - 제조일로부터 5년

9. 분체등은 [의료기기], [일회용], [재사용용지]

[포장단위] 1셋트(Set)/박스

수입업자 상호 : 현대약품(주)

서울시 강남구 봉은사로 135, 5층 (논현동) 전화번호:(02) 2600-3970

제조의뢰자 (제조국) : Districlass Medical SA (프랑스)

제조자(제조국) : Districlass Medical SA (프랑스)

첨부문서의 작성년월 : 2016년 6월 (rev.3)

